

LEADING REGENERATION

Geistlich  
Biomaterials

# Geistlich Bio-Oss Pen<sup>®</sup>

Tratamento simples.  
Para você e seu paciente.

Hidrate.  
Troque a  
ponteira.  
Aplique.

Geistlich Bio-Oss<sup>®</sup>  
em um aplicador  
fácil de usar<sup>1</sup>



# Pronto para usar em apenas alguns passos

## Para você e seu paciente.

Se você tiver um paciente com defeito ósseo de difícil acesso ou com abertura bucal limitada, o tratamento com Regeneração Óssea Guiada pode não parecer possível, mesmo quando é a terapia recomendada. Porém, nossa mais recente solução facilita o processo.

Geistlich Bio-Oss Pen® **simplifica** o processo de **tratamento** e **evita a necessidade de área doadora**.<sup>2,10</sup>

Você gostou? Achamos que sim.

Geistlich Bio-Oss Pen® é uma seringa preenchida com grânulos de Geistlich Bio-Oss® — o substituto ósseo natural líder de mercado para enxerto ósseo que é comparável química e estruturalmente ao mineral ósseo humano.<sup>1,3</sup> Geistlich Bio-Oss® promove vascularização e a formação de um osso novo.<sup>3</sup>

**Geistlich Bio-Oss Pen® é utilizado por clínicos renomados porque o nosso aplicador inovador:**<sup>2</sup>

- > É conveniente e fácil de usar<sup>2</sup>
- > Garante a consistência correta dos grânulos de Geistlich Bio-Oss®<sup>2</sup>
- > Facilita acessar as regiões posteriores da boca<sup>2</sup>
- > Reduz derramamento e desperdício de grânulos residuais<sup>2</sup>



**15 milhões de  
pacientes tratados**<sup>4</sup>

Geistlich Bio-Oss® é o substituto ósseo mais utilizado em cirurgia bucomaxilofacial em todo o mundo e tem sido usado com sucesso para tratar mais de 15 milhões de pacientes.<sup>1,4</sup>



ESCANEE AQUI PARA SABER MAIS  
SOBRE GEISTLICH BIO-OSS®



**Hidrate.  
Troque o bico.  
Aplique.**

Geistlich Bio-Oss Pen® está pronto para usar com apenas três passos simples, e 9 em 10 dentistas acham o produto fácil de manusear.<sup>2</sup>



ESCANEE AQUI PARA ASSISTIR  
AO VÍDEO DE INSTRUÇÃO DO  
GEISTLICH BIO-OSS PEN®

# Tenha mais opções de tratamento

## A escolha é sua.

Geistlich Bio-Oss Pen® está disponível preenchido com grânulos de Geistlich Bio-Oss® small (0,25 a 1 mm) ou large (1 a 2 mm).

A nossa recomendação é utilizar Geistlich Bio-Oss Pen® com **grânulos pequenos** para defeitos pequenos e contorno de enxertos autógenos e Geistlich Bio-Oss Pen® com **grânulos grandes** para enxertos ósseos maiores e levantamento do seio maxilar.

Atinja o mesmo desempenho clínico tanto com os grânulos pequenos quanto com os grandes<sup>5,6</sup>

Geistlich Bio-Oss Pen®  
Grânulos de 0,25 a 1 mm  
0,25 g ~ 0,5 cm<sup>3</sup>



Geistlich Bio-Oss Pen®  
Grânulos de 0,25 a 1 mm  
0,5 g ~ 1 cm<sup>3</sup>



Geistlich Bio-Oss Pen®  
Grânulos de 1 a 2 mm  
0,5 g ~ 1,5 cm<sup>3</sup>



Alvéolos pós-extração  
sem defeito alveolar

Alvéolos pós-extração  
com defeito alveolar

Enxerto ósseo  
menor

Enxerto ósseo  
maior

Levantamento  
do seio maxilar

Peri-implantite

## Alta taxa de sobrevivência do implante com Geistlich Bio-Gide®<sup>8,9</sup>

A combinação de Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide® em Regeneração Óssea Guiada é considerada o tratamento-padrão moderno e é utilizada em uma gama ampla de procedimentos clínicos.<sup>7</sup>

A reabsorção lenta de Geistlich Bio-Oss® aliada à função de proteção de Geistlich Bio-Gide® promove a estabilidade de volume em longo prazo do osso enxertado e assegura altas taxas de sobrevivência do implante.<sup>8,9</sup>



ESCANEE PARA SABER MAIS  
SOBRE GEISTLICH BIO-OSS®





Mais informações sobre nossos parceiros distribuidores:  
[www.geistlich-biomaterials.com](http://www.geistlich-biomaterials.com)

#### Fabricante

Geistlich Pharma AG  
Business Unit Biomaterials  
Bahnhofstrasse 40  
6110 Wolhusen, Suíça  
Telefone: +41 41 492 55 55  
Fax: +41 41 492 56 39  
[www.geistlich-biomaterials.com](http://www.geistlich-biomaterials.com)

#### Filial no Brasil

Av. Brigadeiro Faria Lima 1461, cj.131-134 Torre Sul, Pinheiros. São Paulo-SP  
CEP: 01452-002  
tel: +55 11 2097-2555  
[info@geistlich.com.br](mailto:info@geistlich.com.br)  
[www.geistlich.com.br](http://www.geistlich.com.br)

## Conheça a nossa solução fácil de usar

# Comece sua jornada aqui.

Nove em dez clínicos acham Geistlich Bio-Oss Pen® fácil de usar.<sup>2</sup>  
Comprove você mesmo!

Geistlich Bio-Oss Pen® oferece uma **forma de manuseio aprimorada.**<sup>2</sup>  
Comece sua jornada em busca de tratamentos simples e diretos agora mesmo.



## COMPRAR

Não vê a hora de tratar mais pacientes de forma mais fácil?



VISITE A NOSSA  
LOJA VIRTUAL AGORA MESMO!

## APRENDER

Está interessado em aprimorar suas habilidades cirúrgicas na área de Regeneração Óssea Guiada e em aprender novas técnicas em diferentes áreas de tratamento?



INSCREVA-SE EM UM DOS NOSSOS  
CURSOS MINISTRADOS POR ESPECIALISTAS LÍDERES NO MERCADO!

- 1 Market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials. iData Research Inc. Europe 2019, South Korea 2018, US 2019, India 2018, Japan 2018, Australia 2018, China 2018 (Market Research).
- 2 Geistlich Pharma AG practice test, Nov 2011. Data on file (Wolhusen, Switzerland).
- 3 Galindo-Moreno P et al.: Clin Oral Implants Res 2010; 21 (2), 221-7.
- 4 Data on file. Based on the number of units currently sold. (Wolhusen, Switzerland).
- 5 Chackartchi T et al.: Clin Oral Impl. Res 2011; 22, 473-480
- 6 dos Anjos TLM, et al.: Int J Oral Maxillofac Surg 2016; 45 (12),1556-1563
- 7 Buser D et al.: J Dent Res 2013; 92 (12 Suppl), 176S-82S
- 8 Jung RE et al.: Clin Oral Implants Res 2013; 24 (10), 1065-73.
- 9 Mordenfeld A et al.: Clin Oral Implants Res 2010; 21 (9), 961-70.
- 10 Orsini G et al.: Oral Dis 2007; 13 (6), 586-93.