


Geistlich Panorama®

Guide étape par étape


Sélection facile de la taille

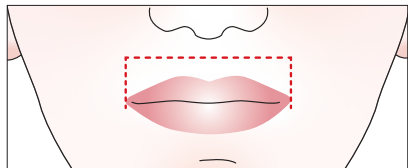



Déterminez la distance entre les commissures des lèvres en suivant la courbe des lèvres...



....et en utilisant les repères de guidage figurant sur le sachet en aluminium.




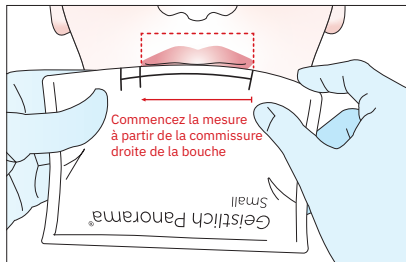


Choisissez la taille correcte en vous basant sur les marquages.

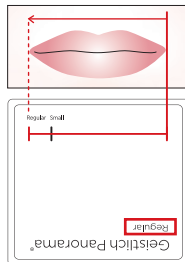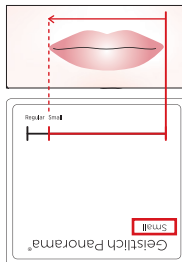




| Taille | Small | Regular |
|---|-------|---------|
| Distance approximative entre les commissures. | 6 cm | 7 cm |

Mise en place facile

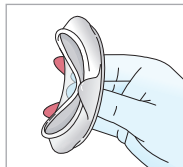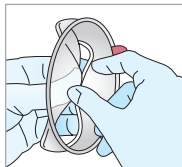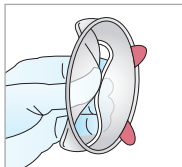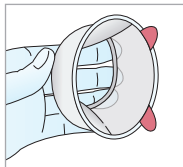

Saisissez l'anneau intra-oral (le plus épais) avec votre main non dominante et compressez-le de manière à former des « ailes » des deux côtés.

Passez ensuite au pouce et à l'index de votre main dominante. Veillez à maintenir l'anneau bien compressé.

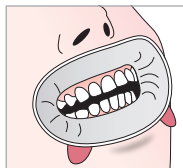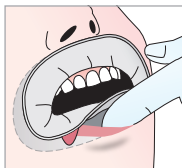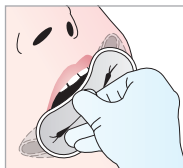

Placez d'abord le Geistlich Panorama® dans la commissure droite de la bouche, puis dans la commissure gauche.

Positionnez le Geistlich Panorama® dans la région vestibulaire inférieure

Positionnez le Geistlich Panorama® dans la région vestibulaire supérieure.

Geistlich Panorama positionné de manière optimale.

Geistlich

Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen
Schweiz

www.geistlich.com



Manufacturer:

DSSM AG
Im alten Riet 9
9494 Schaan
Liechtenstein

www.dssm-group

Rx ONLY

For dental use only!



See
Instructions

Date information prepared: 2025-03-21
DOC-5349-REV. 01

