

환자 안내 정보



치아 임플란트

새로운 미소,
새로운 자신감으로
새로운 나를 만나보세요.

leading regeneration

Geistlich

성공적인 임플란트를 위한 요건

임플란트를 식립하기 전에 고려되어야 할 사항에는 어떤 것이 있나요?



환자의 전반적인 건강



충분한 뼈 부피



환자의 잇몸 건강



환자의 노력

충분한 뼈 부피


뼈이식이 필요한 이유는 무엇인가요?

발치 후 뼈는 자연적으로 흡수되어 부피가 줄어듭니다. 뼈가 재생되지 않으면 뼈 부피가 충분하지 않아 임플란트 식립이 불가능할 수 있습니다.

뼈 부피가 임플란트 식립에 충분하지 않은 경우 어떻게 해야 할까요?

의료진은 임플란트 식립에 필요한 충분한 뼈를 만들어 내기 위해 다음과 같은 여러 재료를 뼈 이식 재료로 사용할 수 있습니다:

- > 환자의 구강, 고관절 또는 두개골에서 채취한 작은 뼈조각 또는 뼈 블록
- > 뼈 이식재
- > 콜라겐 차폐막
- > 위에서 언급한 재료의 조합

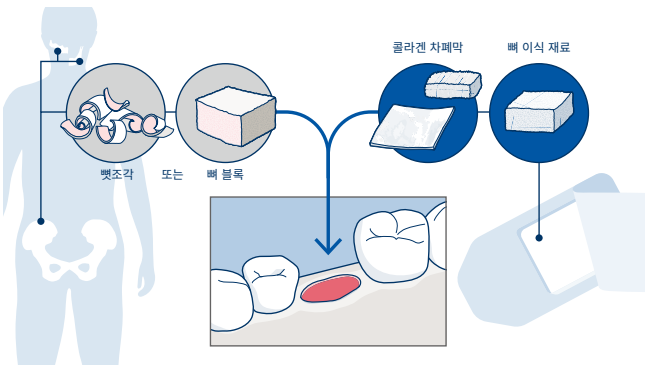

뼈 이식 재료는 환자 몸에서 채취한 재료이거나 기성 생체 재료일 수 있습니다.

환자의 전반적인 건강

전반적인 건강 상태가 치아 임플란트 성공에 어떤 영향을 끼칠 수 있나요?

치아 임플란트 식립은 외과적 시술입니다. 천식이나 당뇨를 앓고 있는 환자, 또는 흡연자의 경우 임플란트 시술을 받을 수 있지만, 전반적으로 건강한 환자에 비해 회복 과정이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 전반적인 건강 상태 및 임플란트 유지 관리도 임플란트의 장기적인 성공에 영향을 미칠 수 있습니다.

환자의 잇몸 건강

왜 건강한 잇몸이 중요한가요?

잇몸의 두께와 질은 임플란트 성공과 심미성 모두에 있어 매우 중요합니다.

잇몸 두께

- > 외부 충격 등으로부터 뼈를 보호
- > 뼈의 안정성 및 심미성 향상

잇몸의 질

- > 박테리아로부터 뼈를 보호



잇몸 건강이 좋지 않은 경우 임플란트 식립 중 또는 식립 전에 잇몸의 질을 개선할 수 있습니다.

환자의 노력


임플란트 주위의 뼈가 줄어드는 원인은 무엇인가요?

구강 위생은 모든 사람에게 중요하지만, 특히 임플란트 치료를 받는 사람들의 경우 뼈 손실을 유발할 수 있는 치아(치주염) 또는 임플란트(임플란트 주위염)에 영향을 끼칠 수 있는 감염을 방지하기 위해서 더욱 중요합니다.



임플란트 주위의 감염은 치아 주위의 감염보다 더 빠르고 더 많은 뼈 손실을 유발합니다. 따라서 임플란트의 장기적인 유지를 위해서는 철저한 구강 위생 관리 및 담당 의료진과의 정기적인 검진이 필수적입니다.

잇몸 염증

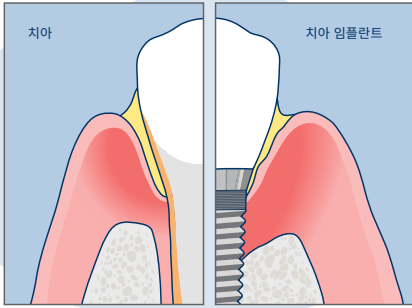

치아 주위(치주염)와 치아 임플란트 주위(임플란트 주위염)에 잇몸 염증이 생기면 치아를 상실할 수 있습니다.

회복

회복을 위해 환자는 어떻게 해야 할까요?

지켜야 할 사항

- > 담당 의료진의 지침을 잘 따라주세요.
- > 수술 부위 자체를 칫솔로 일정 시간 양치하지 못하더라도 구강 위생을 유지해주세요.
- > 담당 의료진이 처방한 구강 세정제가 있다면 꼭 사용해주세요.
- > 촉촉한 냉패드로 부기를 가라앉혀주세요.
- > 통증이 있다면 담당 의료진과 꼭 상담해주세요
- > 필요한 경우 치과를 재방문하여 치료를 받아주세요.

금지 사항

- > 구강 위생을 소홀히 하지 말아주세요.
- > 수술 후 일주일 동안은 수술 부위에 양치질하거나 치실을 사용하지 말아주세요. 상처 주변의 치아를 닦을 경우 칫솔모가 아주 부드러운 칫솔을 사용하시길 권합니다.
- > 수술 후 2~3일 동안은 커피나 술을 마시지 말고 흡연을 하지 말아주세요.

자주 묻는 질문

뼈 재생치료를 위해 알아두면 좋은 정보

- 1. 생체 재료는 무엇으로 구성되어 있습니까?**
가이스트리히의 생체 재료는 소 뼈 또는 돼지 콜라겐으로 구성되어 있으며, 이 두 재료를 조합한 생체 재료도 있습니다.
- 2. 거부 반응이나 알레르기 반응을 일으킬 위험이 있습니까?**
가이스트리히 생체 재료는 환자에게 잘 받아들여지고 있지만, 콜라겐에 알려진 알레르기 반응이 있는 환자의 경우 담당 의료진과 상담하시기를 바랍니다.
- 3. 시술이 고통스럽습니까?**
시술은 국소 마취 후 진행됩니다. 환자가 통증을 느끼게 될 경우 담당 의료진이 마취량을 늘립니다.
- 4. 다음날 직장에 복귀할 수 있습니까?**
예, 그렇습니다. 하지만 격렬한 신체 활동을 수반하는 업무라면 최소 이틀 동안은 피하는 것이 가장 좋습니다.
- 5. 상처 회복까지 얼마나 걸립니까?**
회복 시간에는 개인차가 있습니다. 일반적으로 초기 상처 회복에는 7-10일이 소요됩니다.

안내 동영상

뼈 재생이 성공적인 임플란트 식립과 유지를 어떻게 도와주는 지 확인해보세요.



Geistlich Pharma 한눈에 보기

가이스트리히 생체 재료만의 장점은 어떤 것이 있나요?



고품질
스위스 제품



14초마다 사용되는
가이스트리히 제품



1,400개 이상의 논문에서
과학적으로 입증



전 세계 1,500만 명 이상의 환자
치료 성공



엄격하게 관리되는
제조 공정

Geistlich

Manufacturer

Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen
Switzerland
전화 +41 41 492 55 55
info@geistlich.com
www.geistlich-pharma.com

당사의 제품 유통사에 대한
자세한 정보:
www.geistlich-dental.com



 swiss made

602317/2306/ko © 2023 Geistlich Pharma AG