

leading regeneration

Geistlich



# Geistlich Bio-Gide® Forte

L'equilibrio perfetto tra biologia e resistenza

 swiss made

# Geistlich Bio-Gide® Forte

Geistlich Bio-Gide® Forte è la nuova membrana di collagene a doppio strato di Geistlich. È prodotta con la collaudata tecnologia Geistlich Bio-Gide®, convalidata da un'ampia ricerca scientifica e da decenni di impiego clinico in tutto il mondo. Grazie alle sue specifiche proprietà di maneggevolezza e all'elevata resistenza alla trazione, Geistlich Bio-Gide® Forte è progettata per l'uso in un'ampia gamma di casi di rigenerazione ossea e dei tessuti molli.<sup>1-3</sup>



## Durabilità che garantisce il tuo successo

### Resistenza superiore

Geistlich Bio-Gide® Forte è progettata per offrire un'elevata resistenza alla trazione, risultando eccezionalmente resistente allo strappo durante il fissaggio.<sup>2</sup>

Questa proprietà è vantaggiosa nelle tecniche rigenerative avanzate come la Sausage Technique™, in cui il fissaggio con pin e suture è importante per il mantenimento dello spazio e per la stabilità dell'innesto.<sup>4</sup> Puoi fare affidamento sulla resistenza della membrana, anche nei casi più complessi, beneficiando al contempo della comprovata biocompatibilità della tecnologia Geistlich Bio-Gide®.<sup>5</sup>



## Ottimizza i tempi con la massima facilità d'uso

### Eccezionale maneggevolezza

Puoi contare su una membrana che mantiene la sua stabilità anche quando è idratata: si applica facilmente e si adatta al contorno della cresta. Grazie alle sue caratteristiche, Geistlich Bio-Gide® Forte può essere eventualmente riposizionata fino al raggiungimento del posizionamento desiderato.<sup>1</sup> Queste proprietà aiutano a ridurre i tempi chirurgici.<sup>1</sup>

### Procedura più rapida, guarigione facilitata

L'approccio open-healing con Geistlich Bio-Gide® Forte riduce la necessità di un'ampia mobilizzazione del lembo, riducendo i tempi clinici e minimizzando il disagio per il paziente, per una guarigione facilitata.<sup>6</sup>



## Risultati eccezionali su cui contare


### Efficacia a lungo termine comprovata

Oltre 25 anni di ricerca clinica confermano che l'osso rigenerato con la tecnologia Geistlich Bio-Gide® e Geistlich Bio-Oss® garantisce prestazioni sovrapponibili a quelle dell'osso nativo.<sup>7</sup> Parametri quali la salute peri-implantare, l'estetica, i livelli di osso marginale e la sopravvivenza implantare dimostrano equivalenza clinica, offrendo la sicurezza di risultati stabili a lungo termine.<sup>7</sup>

## Maneggevolezza studiata per te


Geistlich Bio-Gide® Forte è stata progettata specificamente per ottimizzare la maneggevolezza clinica. Una volta idratata, Geistlich Bio-Gide® Forte mantiene una resistenza che ne facilita la manipolazione, ne permette sagomatura e adattamento preciso a ogni tipo di difetto, pur mantenendo la flessibilità necessaria per posizionarla facilmente.<sup>1</sup>

Le sue proprietà strutturali ne consentono il riposizionamento senza perdere stabilità, offrendo ai clinici il controllo e garantendo una copertura accurata del difetto.<sup>1</sup>

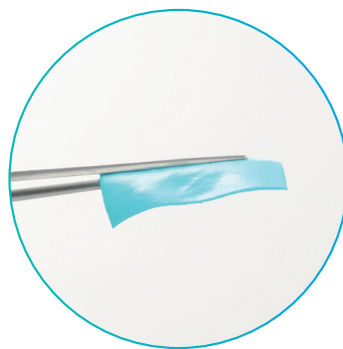

### 1. Rigidità allo stato idratato

A differenza delle membrane che, una volta idratate, diventano difficili da gestire, Geistlich Bio-Gide® Forte mantiene la propria stabilità.<sup>1</sup> Questo permette una manipolazione precisa, un posizionamento facilitato e un adattamento stabile al sito del difetto.<sup>1</sup>

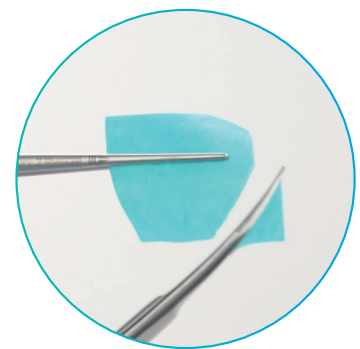


### 2. Sagomabile a secco o dopo idratazione

Geistlich Bio-Gide® Forte può essere sagomata sia allo stato secco sia allo stato idratato.<sup>1</sup> Questa flessibilità ti consente di rifilare la membrana in base alle dimensioni e alla forma del difetto direttamente durante l'intervento, garantendoti un adattamento preciso e una copertura ottimale.<sup>1</sup>



### 3. Massima precisione nel posizionamento

Geistlich Bio-Gide® Forte permette diversi cambi di posizionamento. Se necessario, la membrana può essere sollevata, riposizionata e adattata più volte fino al raggiungimento della posizione ideale.<sup>1</sup> Ciò ti facilita nelle procedure complesse e favorisce una copertura accurata del difetto.<sup>1</sup>

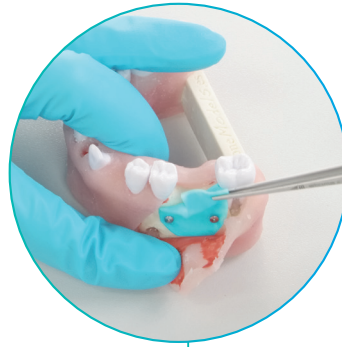

### 4. Distensione agevole

La struttura unica di Geistlich Bio-Gide® Forte impedisce alla membrana di arricciarsi o incollarsi.<sup>1</sup> Si distende facilmente, consentendo una preparazione rapida e un facile posizionamento intraorale e riducendo al minimo il rischio di aumentare i tempi chirurgici.<sup>1</sup>

## Fidati della collaudata tecnologia Geistlich Bio-Gide®

Da oltre 25 anni, la tecnologia Geistlich Bio-Gide® è impiegata in milioni di procedure in tutto il mondo, con esiti clinici comprovati.<sup>8</sup>

Sulla base di questa solida esperienza, Geistlich Bio-Gide® Forte combina un'eccellente maneggevolezza con un'elevata resistenza alla trazione, diventando, insieme a Geistlich Bio-Gide® la membrana di elezione per risultati predicibili e duraturi nella rigenerazione ossea e dei tessuti molli.<sup>1,2,8</sup>

## Presente quando serve

La tecnologia Geistlich Bio-Gide® mantiene la sua funzione di barriera durante la fase critica di guarigione e viene naturalmente riassorbita con il progredire della vascolarizzazione e dell'integrazione tissutale.<sup>9,10</sup>

## Comprovata nella ricerca e nella pratica

### Affidabilità a lungo termine

La tecnologia Geistlich Bio-Gide® è stata valutata in oltre 1300 studi, alcuni con oltre 20 anni di follow-up.<sup>7</sup> È stata usata per trattare più di 10 milioni di pazienti in tutto il mondo.<sup>11</sup>

### Stabilità implantare affidabile

Il successo a lungo termine di un impianto dipende dalla solidità dell'osso in cui è posizionato. L'uso combinato della tecnologia Geistlich Bio-Gide® e di Geistlich Bio-Oss® fornisce un supporto rigenerativo affidabile, creando condizioni che aumentano la stabilità e migliorano la sopravvivenza implantare nel tempo.<sup>12</sup>

### Maggiore sopravvivenza implantare

Studi clinici dimostrano che la tecnologia Geistlich Bio-Gide® migliora i tassi di sopravvivenza implantare rispetto ai siti trattati senza membrana o con altri tipi di membrana, riducendo così il rischio di fallimento implantare.<sup>12, 13, 14</sup>

# Pronto per il prossimo passo?

1

Scopri

Scopri di più su Geistlich Bio-Gide® Forte



2

Prova!

Richiedi una demo non sterile del prodotto Geistlich Bio-Gide® Forte



3

Ordina subito!

Acquista i nostri prodotti sul nostro e-shop!



Trovi tutta la  
bibliografia sul  
nostro sito



## Geistlich – Il nostro impegno è l'odontoiatria rigenerativa

**Geistlich è leader globale nella rigenerazione dentale, supportata da oltre 175 anni di esperienza nella lavorazione e nella raffinazione dell'osso e dei tessuti. Siamo impegnati a sviluppare prodotti basati sulle evidenze che promuovono la rigenerazione di osso, cartilagine e tessuti molli, garantendo una migliore guarigione, stabilità a lungo termine e una qualità di vita superiore per i pazienti.**

### Far progredire la scienza significa miglior assistenza ai pazienti

Con migliaia di studi scientifici e i più elevati standard di qualità svizzeri, plasmiamo il campo della medicina rigenerativa da decenni.

Attraverso i nostri programmi formativi globali, che raggiungono oltre 100.000 professionisti ogni anno, e grazie a strette partnership con i principali ricercatori, clinici e con oltre 100 università in tutto il mondo, facciamo sì che i pazienti possano beneficiare delle più recenti conoscenze scientifiche e di metodi di trattamento avanzati.

### Radicati nella tradizione, guidati dall'innovazione

Come azienda a conduzione familiare di quinta generazione, Geistlich è sinonimo di affidabilità, fiducia e innovazione. Sviluppiamo con cura i nostri prodotti pensando a dentisti, chirurghi e pazienti e ampliando costantemente il nostro portafoglio grazie a innovazioni interne e partnership strategiche. Dal cuore della Svizzera al mondo, offriamo soluzioni a lungo termine che consentono la migliore assistenza possibile ai pazienti.

### Cresci con Geistlich



#### Programmi formativi

Corsi di formazione completi e su misura per tutti i professionisti del settore dentale.



#### Checklists e modelli

Geistlich offre strumenti per semplificare la chirurgia orale e garantire risultati costanti.



#### Informazioni al paziente

Geistlich mette a disposizione fornisce materiali informativi per supportare l'educazione del paziente e aumentare la percentuale di accettazione del trattamento.



#### Opportunità scientifiche

Geistlich sostiene la comunità scientifica supportando protocolli di ricerca e programmi Young KOL per contribuire all'innovazione nella rigenerazione dei tessuti duri e molli.

#### PRODUTTORE

Geistlich Pharma AG  
Bahnhofstrasse 40  
6110 Wolhusen  
Switzerland  
Phone +41 41 492 55 55  
info@geistlich.com  
www.geistlich.com

#### FILIALE ITALIANA

Geistlich Biomaterials Italia S.r.l.  
Via Castelletto, 28 - 36016 Thiene VI  
Tel. +39 0445 370890  
Fax +39 0445 370433  
info@geistlich.it  
www.geistlich.com/it-it/

### Geistlich Bio-Gide® Forte è disponibile in tre pratici formati:

13 × 25 mm  
25 × 25 mm  
30 × 40 mm

